



各 部 名 称


腰サポーター(本体)

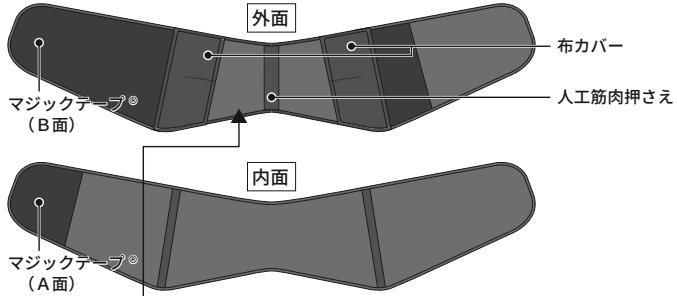

人工筋肉ユニット(本体に取付済)

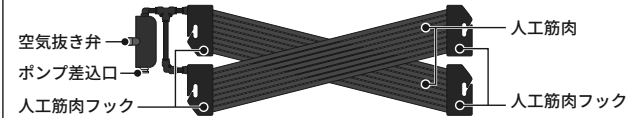


空気挿入用ポンプ

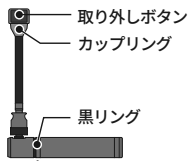

△ご使用上の注意とお願い

ポンプの仕様上、黒リング部品が緩まりやすく、空気が漏れる場合がございます。

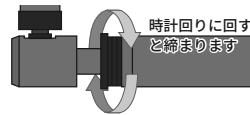

緩くなった場合は上図の矢印のように時計回りに手で回し、締め直してからお使いください。

アフターサービス・保証書

1.保証書について

- 保証書は取扱説明書(4p下部)に付いております。保証書内容をよくお読みいただき、納品書と一緒に大切に保管してください。保証期間は、出荷日から1年間です。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社問合せ窓口よりお電話にてご相談のうえ、保証書を添えて商品をお送りください。

3.日本国外での対応について

- 本製品は日本国外での対応はおりませんので保証の対象外となります。ご了承ください。

無料修理規定

- 取扱説明書の記載事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害などによる故障及び損傷
 - 保証書と納品書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合は、弊社問合せ窓口にお問合せください。(問合せ窓口：0120-51-5651)

保証書

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。右記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社問合せ窓口のフリーダイヤルより修理をご依頼ください。お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

品名	エアサポシリーズ 腰助くん		
型式	PAS-W01-M/L/LL		
保証期間	出荷日から1年	出荷日	納品書に記載
● お客様記入欄			
ご住所	〒		
お名前	様	電話番号	

NKE株式会社

本社工場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-0653 FAX:075-924-4653
 さいたま営業所 〒337-0007 さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2-13-22 1F ビル金山1F TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290

● 断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
 © 2020 NKE Corporation

製品に関する問合せ窓口はこちら
 フリーダイヤル

☎ 0120-51-5651 AM9:00~PM5:00 (土日、祝祭日除く)

- ◆ ホームページ <https://www.nke.co.jp/>
- ◆ メール promotion@nke.co.jp

NKE

Humanized Automation

腰サポーター よう すけ
エアサポ **腰助くん** 取扱説明書

はじめに

このたびは、(エアサポシリーズ 腰助くん)をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品は腰のサポート器具です。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡しくください。

安全上のご注意 ※必ずお読みください

警告 下記内容を無視して誤った取り扱いをすると、使用者や第三者が死亡または重傷を負う可能性があります。

- 用途以外でのご使用はお止めください。ケガや本製品の破損の原因となります。
- 本製品の改造・加工はおこなわないでください。ご使用中に本製品が破損し、ケガをする恐れがあります。
- 以下に該当する方は、ご使用をお止めください。症状の悪化や異常の発生を招く恐れがあります。
 - ・腰にケガや血行不良、その他疾患がある方
 - ・妊娠中の方
 - ・低体力の方
 - ・中学生以下の方
- 以下の場合は、すぐに使用を中止し、専門医へご相談ください。
 - ・痛み、しびれ等の異常を感じた場合
 - ・かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常を感じた場合
- 以下のことを守ってご使用ください。正しくご使用されない場合、十分なサポートが得られないだけでなく、身体が過度に圧迫されたり、製品が周囲に引っかかるなどし、ケガや本製品の破損の原因となります。
 - ・【サイズ表】を参考に適切なサイズの製品をご使用ください。
 - ・【装着方法】に従い、正しく装着・調節してください。
 - ・【使用方法】と【保管方法】に従い、正しくご使用ください。
 - ・【洗濯方法】に従い、正しく手入れをおこなってください。
 - ・装着時には必要以上に締め付けしないでください。
 - ・就寝時には使用しないでください。
 - ・鋭利なものや尖ったものとの接触は避け、一緒に保管しないでください。
 - ・故意に落としたり、重量物を載せたりしないでください。
 - ・過度に力を加えないでください。
 - ・付属の空気挿入用ポンプ以外は使用しないでください。
- 万が一、本製品に破れ、破損、亀裂、マジックテープ®の貼り付き不良等がみとめられる場合はご使用をお止めください。(問合せ窓口：0120-51-5651までご連絡ください。)

注意 下記内容を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者や第三者が軽傷を負う可能性と他の財物への損害の可能性がります。

- 人工筋肉を他の布製品や紙製品と接触させて保管した場合、人工筋肉の素材成分により汚れる場合がありますのでご注意ください。
- マジックテープ®に衣類を挟んだり、マジックテープ®を衣類に貼り付けたりしないようご注意ください。衣類を破損させることがあります。
- マジックテープ®で肌を傷つけないようご注意ください。
- 腰サポーターを洗濯する際は、【洗濯方法】に従ってください。(人工筋肉ユニットは洗濯できません。)
- 汗や摩擦などで他の生地に移色する恐れがあります。


保存用

型式：PAS-W01-□

エアサポシリーズ 腰助くん

□には下記サイズが入ります
 M：Mサイズ
 L：Lサイズ
 LL：LLサイズ

セット内容

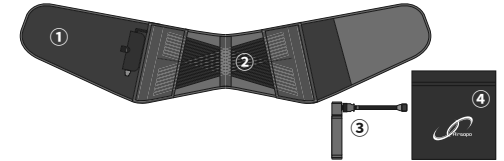

品目	数量
① 腰サポーター(本体)	1
② 人工筋肉ユニット(本体に取付済)	1
③ 空気挿入用ポンプ	1
④ 専用ケース	1

サイズ表


サイズ	M	L	LL
ヒップ(cm)	75~95	90~105	100~115

仕様

項目	仕様
本体寸法	Mサイズ：93.5×22.5cm Lサイズ：103.5×23.5cm LLサイズ：113.5×25.5cm
質量	本体：約340g (空気挿入用ポンプを含まない)
サポート部位	腰
適正環境温度	0~40°C
駆動源	圧縮空気
動作部	人工筋肉16本
圧縮空気供給	空気挿入用ポンプ
素材表示	ナイロン、ポリウレタン、その他

保管方法


- 直射日光が当たらず、湿気の少ない風通しの良い場所で保管してください。

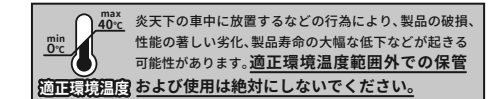

- マジックテープ®は、貼り付けた状態で保管してください。
- 人工筋肉を過度に折り曲げないでください。

装着方法


① 腰助くんの前後上下を確認します

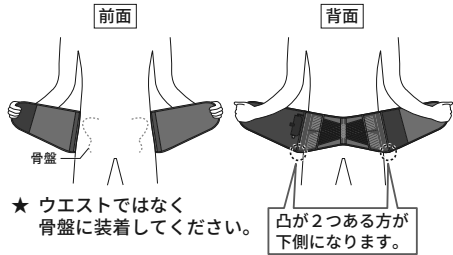

★ ウエストではなく骨盤に装着してください。

凸が2つある方が下側になります。

② 軽く引っ張りながら締め付け、前側で留めます

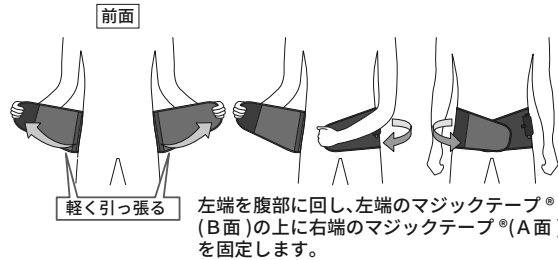

軽く引っ張る

左端を腹部に回し、左端のマジックテープ®(B面)の上に右端のマジックテープ®(A面)を固定します。

警告


順序に従って正しく装着してください。正しく装着されないと、十分なサポートが得られず、身体が過度に圧迫されたり製品が周囲に引っかかるなどし、ケガや本製品の破損の原因となります。

使用方法

サポート機能をONにする

★ 正常な製品でも時間が経過する毎に、わずかずつ空気が抜けていきます。長時間使用する際は付属のポンプで定期的に空気を入れ足してください。

① ポンプを取り付け、人工筋肉に空気を入れます

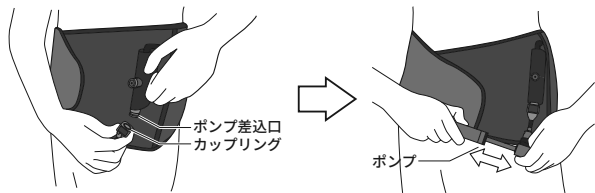


カップリングをポンプ差込口へ「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

ポンプを使い、空気を入れてください。(ポンピング目安回数: **20~25回**)

△ 空気の入れすぎにご注意ください
必ずポンピング目安回数を守ってご使用ください。
無理に空気を入れすぎると破損の原因となります。


② 取り外しボタンを押し、ポンプを外します

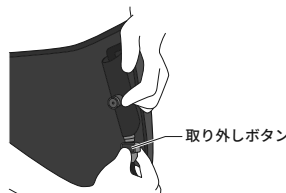


カップリングについている取り外しボタンを押すとポンプが外れます。

サポート機能をOFFにする

① 空気抜き弁を押します (空気が抜け、サポートが解除されます)

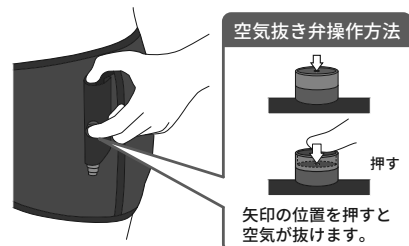


空気抜き弁操作方法

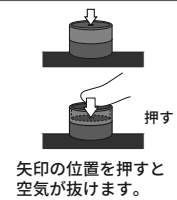

矢印の位置を押すと空気が抜けます。

サポート機能ON/OFF時の人工筋肉

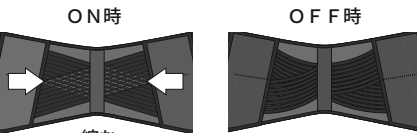


空気を入れると人工筋肉が収縮し、腰を締めつけます。締めつけ感、人工筋肉に入れる空気量で調節できます。

★ 腰助くんを取り外す時は、空気抜き弁のボタンを押してサポートが解除されていることを確認してから取り外してください。


洗濯方法

人工筋肉ユニット 洗濯できません。汚れた場合は軽く布で拭き取るぐらいにしてください。

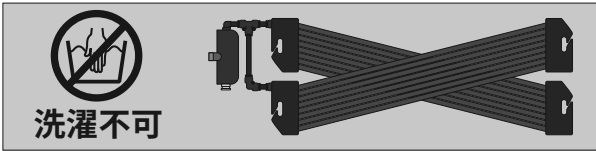


腰サポーター 全て手洗い洗濯できます。

- 腰サポーターが汚れてしまった場合、【洗濯方法】に従って手入れをおこなってください。(汚れが付着したままの状態で放置した場合、劣化の恐れがあります。)
- 下記の洗濯表示に従って、洗濯をおこなってください。

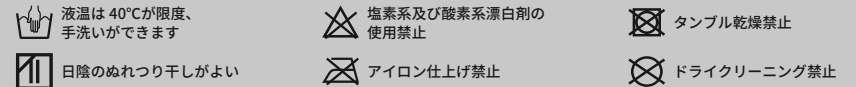

① 本製品に取り付けてある“人工筋肉ユニット”を取り外します

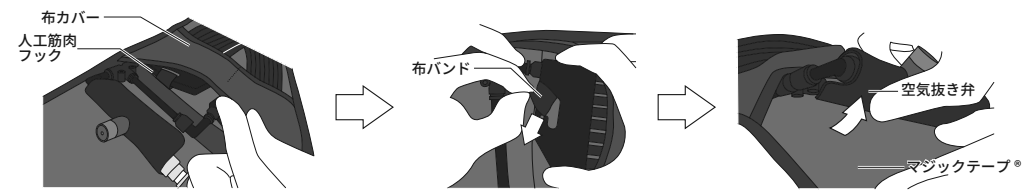


布カバーをめくって人工筋肉フックを取り出します。

図のように、布バンドを人工筋肉フックの溝に入れ、矢印の方向に抜きます。(全4箇所おこないます。)

空気抜き弁をマジックテープ®からはがします。

② 腰サポーターは手洗い洗濯をおこなってください (※洗濯機洗いはできません)

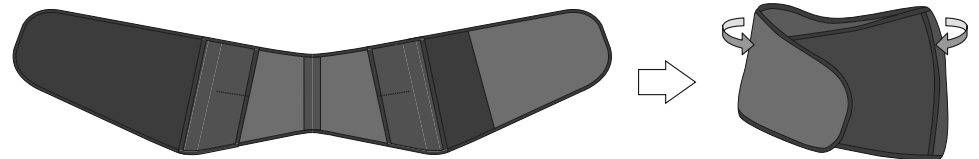

★ 絞らないでください。
★ 淡色や白物と一緒に洗うと色移りする恐れがあります。

★ 洗濯の際は、マジックテープ®を本体に留めた状態にしてください。

③ 洗濯後は日陰でつり干ししてください

★ 乾燥機を使用しないでください。製品をいためる原因となります。
★ 乾燥後は、取り外し時と逆の手順で取り付けてください。

廃棄方法

- 各自治体の指示に従い、廃棄処分してください。